

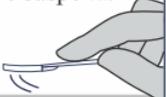
⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

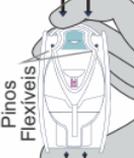
# IDenta Touch&Know

Kits de Teste de Drogas

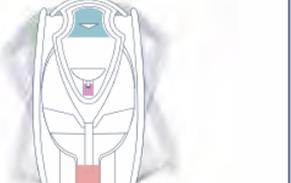
## Cartão de Procedimento para IDT 1000T Identificação de Cocaína/Crack Substância e Vestígios

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	<b>1</b> Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. 	<b>2</b> Amostra de substância ou superfície suspeita.		
		<b>Pó</b> Toque o adesivo Smart-Tip™ na amostra. 	<b>Líquido</b> Coloque o papel absorvente da sonda Smart-Tip™ no líquido. Certifique-se que o papel está molhado. 	<b>Material Suspeito</b> Passe o papel da sonda Smart-Tip™ contra a superfície suspeita. 

Preparação do Teste	<b>3</b> Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.  Pinos Flexíveis	<b>STOP</b> Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	Identificação da Câmara 1	<b>4</b> Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula. 	<b>5</b> Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. 
---------------------	--	--	---------------------------	--	--

Resultados da Câmara 1	 O aparecimento de partículas de cor turquesa coladas na ponta do amostrador, no papel, ou saindo da solução na janela frontal ou traseira indica a presença de <b>Cocaína</b> . <i>A cor pode desaparecer com o tempo. Nota: O líquido continuará cor de rosa.</i> <i>* Opcional Apenas para Teste de Substâncias: Confirme os resultados com o Kit IDenta de Confirmação de Cocaína/Crack. (IDT 1100).</i>	 Se aparecer cor, continue para a Eliminação. Se não aparecer qualquer cor, continue para a etapa 6.
------------------------	--	---

Identificação da Câmara 2	<b>6</b> Com o polegar e o dedo indicador, esprema a câmara 2 até quebrar a cápsula. 	<b>7</b> Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos. 
---------------------------	---	---

Resultados da Câmara 2	 O aparecimento de partículas de cor turquesa coladas na ponta do amostrador, no papel, ou saindo da solução na janela frontal ou traseira indica a presença de <b>Crack (Base de Cocaína)</b> . <i>A cor pode desaparecer com o tempo. Nota: O líquido continuará cor de rosa.</i> <i>* Opcional Apenas para Teste de Substâncias: Confirme os resultados com o Kit IDenta de Confirmação de Cocaína/Crack. (IDT 1100).</i>	 Se não a parecer qualquer cor, não existe presença de Cocaína ou Crack e a confirmação não é necessária.
------------------------	--	---

**Eliminação** É seguro eliminar o kit de teste na lixeira.



**Todos os resultados são presumíveis.**

Se necessário, outros testes de confirmação por um laboratório de testes de drogas competente podem determinar a identificação e quantificação adicional usando análise por espectrometria de cromatografia gasosa / massa.

**Vestígios:** A confirmação laboratorial de vestígios pode também ser aplicada pois o teste não é destrutivo. O kit de teste pode ser enviado para laboratório de análise de drogas.