

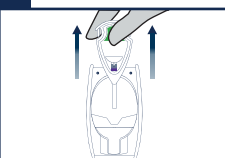

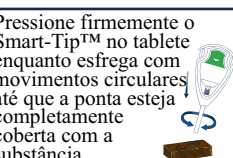
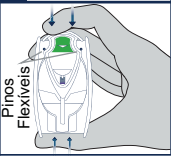
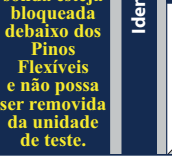
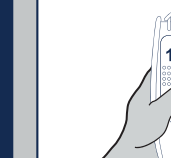
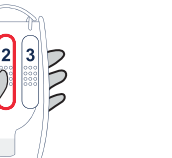


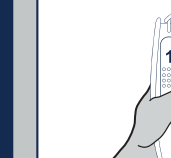
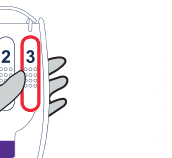


⚠️ Leia Antes de Usar ⚠️

IDenta
Touch&Know

Kit Teste de Drogas

Cartão de Procedimento para IDT 3000 Identificação IDenta de **Marijuana/Haxixe** Substância

Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

Preparação do Teste	1 Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste. 	2 Amostra de substância suspeita. Matéria Vegetal Toque o adesivo Smart-Tip™ na amostra. Certifique-se que a ponta está totalmente coberta. 	Haxixe Pressione firmemente o Smart-Tip™ no tablete enquanto esfrega com movimentos circulares até que a ponta esteja completamente coberta com a substância. 
	3 Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.  Pinos Flexíveis	STOP Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	4 Com o polegar e o antededo, esprema a câmara 1 até quebrar a cápsula. 
Identificação	6 Com o polegar e o antededo, esprema a câmara 2 até quebrar a cápsula. 	7 Agite suavemente a unidade de teste durante 5-10 segundos.  Aguarde 3 minutos para a cor se desenvolver plenamente.	
	Resultados  Se aparecer a cor azul-violeta, continue para a etapa 8.	 Se não aparecer qualquer cor azul-violeta, não existe presença de Marijuana ou Haxixe. Continue para a Eliminação.	
Confirmação	8 Com o polegar e o antededo, esprema a câmara 3 até quebrar a cápsula. 	9 Agite vigorosamente a unidade de teste durante 20 segundos.  Mantenha firme a unidade de teste, até que 2 camadas estejam visivelmente separadas. Isto pode demorar até 2 minutos.	
	Resultados de Confirmação  O aparecimento de cor azul-violeta na camada inferior de líquido indica fortemente a presença de Marijuana ou Haxixe. * A cor pode ficar mais escura com o tempo.	 Se a camada inferior de líquido não apresentar cor violeta, não existe presença de Marijuana ou Haxixe.	
Eliminação	É seguro eliminar o kit de teste na lixeira.		

10-13
POB

Todos os resultados são presumíveis.

Se necessário, outros testes de confirmação por um laboratório de testes de drogas competente podem determinar a identificação e quantificação adicional usando análise por espectrometria de cromatografia gasosa / massa.